

Weldra Urinenachtzak ^{CE}



- ✓ Urine kan niet terug de slang in lopen dankzij de terugslagklep
- ✓ Het geïntegreerde filter minimaliseert de kans op vacuüm trekken
- ✓ Verkrijgbaar in 2000 en 3000 ml

Productomschrijving

De Weldra Urinenachtzak is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en kan aan de meeste urinstomazakjes en katheters gekoppeld worden. Het is een niet-steriele, druppelvormige urinenachtzak, die middels een schuifstelsel met één hand te legen is. Ook heeft de urinenachtzak een terugslagklep, waardoor urine niet terug de slang in kan lopen. De kans op vacuüm trekken van de urinenachtzak wordt tot een minimum beperkt, dankzij het geïntegreerde filter.

De Weldra Urinenachtzak is verkrijgbaar in twee varianten. De standaard variant beschikt over een opvangcapaciteit van 2000 ml en heeft een slang van 135 cm. De grotere variant heeft een opvangcapaciteit van 3000 ml en een slang van 140 cm. Beide varianten zijn voorzien van twee ophanghaken.

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Haal de drainagetap, onderaan de urinenachtzak, uit de insteekopening. Controleer of de drainagetap aan de onderkant van de urinenachtzak gesloten is (zie foto 1).
2. Hang, indien mogelijk de urinenachtzak naast het bed op (is dit niet mogelijk, zorg dan voor een goede afvoer). Maak daarbij gebruik van de dubbele ophanghaken. Gebruik het koord om de urinenachtzak op zijn plaats te houden (zie foto 2).
3. Druk het mondstuk, aan het einde van de slang van de urinenachtzak, stevig in de opening (kraantje) van het stomazakje of de katheter (zie foto 3 en 4).
4. Controleer of de aansluiting goed is uitgevoerd. Kijk of er eventuele blokkades zijn. De slang dient vrij te zijn van kronkels of knikken, zodat de urine goed kan doorlopen.
5. Plaats de drainagetap onderaan in de opening. Door deze weg te stoppen, blijft de tap schoon (zie foto 5).
6. Ontkoppel 's morgens de urinenachtzak van het stomazakje of de katheter. Leeg de urinenachtzak in het toilet, met behulp van de drainagetap, aan de onderzijde. Spoel de urinenachtzak na met water en bewaar op een schone en droge plaats. De Urinenachtzak is niet steriel en kan meerdere keren gebruikt worden.



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Unifit Comfort Urinenachtzak	Unifit Comfort Urinenachtzak
Inhoud	10 stuks	10 stuks
Artikelcode	WMNZ2000	WMNZ3000
Opvangcapaciteit	2000 ml	3000 ml
Wijdte slang	9 mm	9 mm
Lengte slang	135 cm	140 cm