

# Silfy Siliconentape **CE**



- ✓ Huidvriendelijke, krachtige en pijnloze fixatie
- ✓ Waterproof
- ✓ Kan meerdere dagen op de huid blijven zitten
- ✓ Behoud kleefkracht bij herpositioneren
- ✓ Zeer eenvoudig op maat te scheuren, aan te brengen en pijnloos te verwijderen.

## Productomschrijving

**Silfy Siliconentape is een breed inzetbaar product voor situaties waar een uiterst huidvriendelijke kleefkracht met een zo beperkt mogelijke belasting van de huid vereist is.**

Zachte en maximale bescherming bij optimale hechting. Bijvoorbeeld wanneer de huid als gevolg van radiotherapie, chemotherapie of dialyse broos en/of beschadigd is. Ook toepasbaar bij het (extra) fixeren van katheters, wond- of stomaproducten.

Inzetbaar bij zowel volwassenen als kinderen.

Zeer eenvoudig op maat te scheuren, aan te brengen en pijnloos te verwijderen. Behoud z'n kleefkracht, zelfs na meerdere keren positioneren.

# Silfy Siliconentape

Tips voor gebruik



## Voorbereiden


- Maak de huid vrij van eventuele haren
- Zorg voor een schone en vetvrije huid (bij voorkeur de huid eerst reinigen met water)
- Vermijd het gebruik van crèmes en poeders
- Dep de huid goed droog (let op: de tape hecht niet op een vochtige ondergrond)

## Aanbrengen

- Breng het te fixeren product in de juiste positie
- Bepaal de gewenste lengte van de siliconentape
- Scheur de siliconentape af
- Breng de siliconentape aan
- Wrijf over de siliconentape voor een optimale hechting

## Verwijderen

- Maak de uiteinden van de siliconentape los
- Trek of pel de siliconentape voorzichtig van de huid
- Deponeer het verwijderde materiaal bij het huisvuil

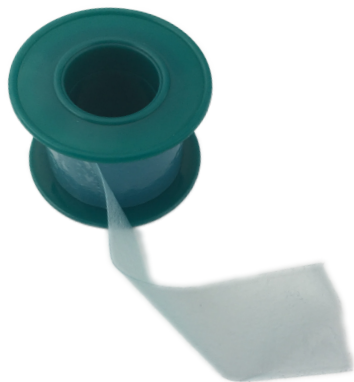

Artikelcode	Product	
SST25150	Silfy Silicone Fixatietape 1.5m x 2.5cm	Wond
SST25150K	Silfy Silicone Katheter Fixatietape 1.5m x 2.5cm	Continentiezorg Katheter
SST25150S	Silfy Silicone Stoma Fixatietape 1.5m x 2.5cm	Stoma
SST25150U	Silfy Silicone Uro Fixatietape 1.5m x 2.5cm	Continentiezorg Afvoerend
SST25150V	Silfy Silicone Sonde Fixatietape 1.5m x 2.5cm	Voeding