


## Erland Care pleister <sup>CE</sup>

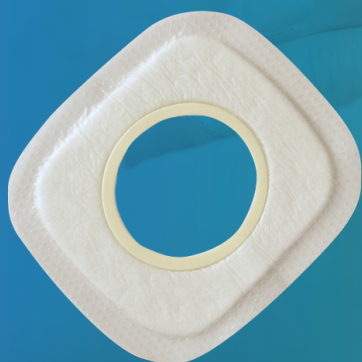

- ✓ Extra opvangcapaciteit in het super-absorberende deel van de pleister
- ✓ Optimale bescherming van de huid
- ✓ Huidvriendelijk door siliconenlaag

### Productomschrijving

De Erland Care super-absorberende pleister is een nieuw alles-in-één product dat een extra veilige en comfortabele ondersteuning biedt aan het stoma opvangmateriaal. Het zorgt ervoor dat bij een lekkage extra opvangcapaciteit is verwerkt in het absorberende deel van de pleister. De super-absorberende pleister wordt aangebracht en absorbeert een groot volume output van de stoma bij een lekkage.

# Erland Care pleister

## Gebruiksadvies

### 1. Eenvoudig in gebruik

Het stoma opvangzakje kan eenvoudig door de opening van de pleister gehaald worden (foto 1). Probeer de pleister, indien mogelijk, zonder plooiën aan te brengen (foto 2).

### 2. Optimale bescherming

De extra opvangcapaciteit in het absorberende deel van de pleister biedt comfortabele ondersteuning aan het stoma opvangmateriaal. Nadat de pleister is aangebracht absorbeert deze een groot volume output van de stoma bij een lekkage (foto 3).

### 3. Betrouwbaar en zeker

De pleister is ontwikkeld voor stomadragers die problemen ondervinden met het stoma opvangmateriaal en daardoor lekkages hebben. Eventuele output zal door het luchtdoorlatende schuimverband worden geabsorbeerd.

### 4. Verwisselen pleister

Het volume van de output bij lekkages bepaalt de frequentie van het wisselen van de pleister. De pleister dient bij verzadiging (lekkage) te worden verwisseld. Draagtijd: 24 - 72 uur (afhankelijk van stomasysteem).

*Dit product biedt uitkomst bij lekkages, voor meer zekerheid en comfort. Het is belangrijk om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. Mochten er aanhoudende lekkageproblemen zijn, neem dan contact op met een stomaverpleegkundige of een zorgprofessional.*



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Voor instructiefilmpje kijk op [www.wellform.nl](http://www.wellform.nl)

Product	Erland Care pleister
Inhoud	10 stuks
Artikelcode - 16,3 x 18,4 cm	MED PAD 0118

## Waarschuwing:

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (zie verpakking)

De Erland Care pleister is een product voor éénmalig gebruik. Eenmaal uit de verpakking en nadat de strips zijn verwijderd, is het product geclassificeerd als 'gebruikt' en mag het niet opnieuw worden gebruikt.