



Secuthin Huidbeschermingscrème ^{CE}



- ✓ Optimale huidbescherming
- ✓ Niet vette huidbeschermende crème

Productomschrijving

Secuthin huidbeschermingscrème is een niet vette crème. Deze biedt bescherming voor de huid. De crème is neutraal en kan o.a. gebruikt worden voor de huid rondom de stoma. De crème trekt snel in en heeft geen invloed op de kleefkracht van het stomamateriaal.

Secuthin Huidbeschermingscrème ^{CE}

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Reinig en droog de huid.
2. Breng een geringe hoeveelheid crème aan.
3. Masseer de crème goed in totdat de huid stroef aan voelt.
4. Breng het stomamateriaal aan.



Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Inhoud	Artikelcode
Secuthin Huidbeschermingscrème	50 gram	WSC50