

Urinenachtzak ^{CE}



Urine kan niet terug de slang in lopen, dankzij de anti-terugslagklep

Met handige ophanghaken voor veilige bevestiging aan een stoel of bed

Gemakkelijk met één hand te legen met behulp van het kraantje

Productomschrijving

De Wellform Urinenachtzak is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en kan aan de meeste urinestomazakjes gekoppeld worden. Het is een steriele, rechthoekig gevormde Urinenachtzak, die gemakkelijk met één hand te legen is door middel van de drainagetap.

De Urinenachtzak beschikt over een grote opvangcapaciteit (2000 ml) en een extra lange slang (van 130 cm).

Verstopingen worden verminderd en vloeiende doorstroom van urine wordt bevorderd dankzij de extra wijde slang (9 mm). Ook heeft de Urinenachtzak een anti-terugslagklep, waardoor urine niet terug de slang in kan lopen. De handige ophanghaken en het koord kunnen gebruikt worden voor veilige bevestiging van de Urinenachtzak aan een stoel of bed.

Urinenachtzak

Gebruiksaanwijzing

1. Controleer of de drainagetap aan de onderkant van de Urinenachtzak gesloten is.
2. Hang de Urinenachtzak naast het bed op. Maak daarbij gebruik van de ophanghaken. Gebruik het koord om de Urinenachtzak op zijn plek te houden (zie foto 1).
3. Druk het mondstuk, aan het einde van de slang van de Urinenachtzak, stevig in de drainagetap van het stomazakje of de katheter (zie foto 2).
4. Controleer of de aansluiting goed is uitgevoerd. Kijk of er eventuele blokkades zijn. De slang dient vrij te zijn van kronkels of knikken. Hierdoor zou de urine 's nachts mogelijk niet goed kunnen aflopen.
5. Plaats de drainagetap onderaan in de opening. Door deze weg te stoppen, voorkomt u vervuiling van de drainagetap (zie foto 3).
6. Ontkoppel 's morgens de Urinenachtzak van het stomazakje. Leeg de nachtzak in het toilet, met behulp van de drainagetap, aan de onderzijde van de Urinenachtzak (zie foto 4).

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Product	Urinenachtzak
Inhoud	10 stuks
Artikelcode	UND201
Opvangcapaciteit	2000 ml
Wijdte slang	9 mm
Lengte slang	130 cm

Distributeur: Wellform Medical BV • Muskushouwestraat 33 • 6666 MA Heteren
T 088 - 6670065 • E info@wellform.nl • I www.wellform.nl

Changshu Linkmed Medical Device Co., LTD No. 8 Zengfy Road, Baimao Industrial Park, Guli Town,
215532 Changshu City, Jiangsu Province, People's Republic of China

ISS02/2017/09