

## Unifit Comfort Urinenachtzak <sup>CE</sup>



Urine kan niet terug de slang in lopen,  
dankzij de anti-terugslagklep

Het filter minimaliseert de kans op  
vacuüm trekken

In twee varianten verkrijgbaar

### Productomschrijving

De Wellform Unifit Comfort Urinenachtzak is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en kan aan de meeste urinestomazakjes gekoppeld worden. Het is een steriele, druppelvormige Urinenachtzak, die met één hand te legen is, middels een schuifstelsel. Ook heeft de Urinenachtzak een anti-terugslagklep, waardoor urine niet terug de slang in kan lopen. De kans op vacuüm trekken van de Urinenachtzak wordt tot een minimum beperkt, dankzij een speciaal filter.

De Wellform Unifit Comfort Urinenachtzak is verkrijgbaar in twee varianten. De standaard variant beschikt over een opvangcapaciteit van 2000 ml en heeft een slang van 135 cm. De grotere variant heeft een opvangcapaciteit van 3000ml en een slang van 140 cm. Beide varianten zijn voorzien van twee ophanghaken.

# Unifit Comfort Urinenachtzak

## Gebruiksaanwijzing

1. Haal de drainagetap, onderaan de Urinenachtzak, uit de insteekopening. Controleer of de drainagetap aan de onderkant van de Urinenachtzak gesloten is (zie foto 1).
2. Hang de Urinenachtzak naast het bed op. Maak daarbij gebruik van de dubbele ophanghaken. Gebruik het koord om de Urinenachtzak op zijn plek te houden (zie foto 2).
3. Druk het mondstuk, aan het einde van de slang van de Urinenachtzak, stevig in de opening (kraantje) van het stomazakje of de katheter. (zie foto 3 en 4).
4. Controleer of de aansluiting goed is uitgevoerd. Kijk of er eventuele blokkades zijn. De slang dient vrij te zijn van kronkels of knikken, zodat de urine goed kan doorlopen.
5. Plaats de drainagetap onderaan in de opening. Door deze weg te stoppen, voorkomt u vervuiling van de tap.
6. Ontkoppel 's morgens de Urinenachtzak van het stomazakje. Leeg de nachtzak in het toilet, met behulp van de drainagetap, aan de onderzijde van de Urinenachtzak.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Product	Unifit Comfort Urinenachtzak	Unifit Comfort Urinenachtzak
Inhoud	10 stuks	10 stuks
Artikelcode	WMNZ2000	WMNZ3000
Opvangcapaciteit	2000 ml	3000 ml
Wijdte slang	9 mm	9 mm
Lengte slang	135 cm	140 cm