

ZenSetiv **Hydrocolloïde vormen**



Verkrijgbaar in diverse varianten.

Hecht direct zonder voor te verwarmen.

Biedt direct bescherming.

PRODUCTOMSCHRIJVING

De ZenSetiv Hydrocolloïde vormen beschermen de huid en bieden extra zekerheid. De vormen zijn gemaakt van huidvriendelijk en absorberend hydrocolloïd, afgewerkt met een flexibele toplaag. Het beschermt de huid bij stomata, fistels of wonden. De vormen kunnen gebruikt worden om de randen van stoma- of wondmateriaal huidvriendelijk te fixeren. Ook kunnen de vormen als extra absorberende huidplaat onder stomamaterialen ingezet worden.

ZenSetiv **Hydrocolloïde vormen** ^{CE}

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiden

1. Knip, indien nodig de vorm van het hydrocolloïd bij.
Het hydrocolloïd moet rond rondom minimaal 1,5 tot 2 cm groter zijn dan het te beplakken gebied.

Aanbrengen

2. Reinig de huid voorzichtig met lauw water en dep deze droog.
3. Breng de vorm aan op de huid en wrijf goed aan.
Let op: de vorm hecht wel op een vochtige ondergrond, maar niet op een vette ondergrond.

Verwijderen

4. Pel de vorm voorzichtig af. Ondersteun de huid hierbij en verwijder de vorm langzaam van boven naar beneden.
Vervissel de vorm indien er lekkage is, de vorm volledig verzadigd is of na een week.



Specificaties

Artikelcode	Product	Inhoud
HSR090	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - rond, 9 cm	5 stuks
HSR120	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - rond, 12 cm	5 stuks
HSR125	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - 12,5 x 12,5 cm	5 stuks
HSR200	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - 20 x 20 cm	5 stuks
HSR522	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - 5 x 22 cm	20 stuks
HSU200	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Ultra Thin - 20 x 20 cm	5 stuks
HSU311	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Ultra Thin - 3 x 11 cm	20 stuks
HSU511	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Ultra Thin - 5 x 11 cm	20 stuks
HSF311	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Soft Foam - 3 x 11 cm	20 stuks
HSF511	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Soft Foam - 5 x 11 cm	20 stuks
HSF522	ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Soft Foam - 5 x 22 cm	20 stuks

Distributeur: Wellform Medical BV • Muskushouwestraat 33 • 6666 MA Heteren
T 088 - 6670065 • E info@wellform.nl • I www.wellform.nl